

Instrução de Uso

OTO SCOPE **ANVISA: 82075150007**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Sistema para Gravação de Imagens Médicas

Nome Comercial: Oto Scope

Produto Não Estéril

Validade: Indeterminado

Produto passível de Reprocessamento

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O Oto Scope é embalado unitariamente em caixa de papel triplex 300g.

INDICAÇÃO

O Oto Scope é um adaptador fotográfico que deve ser utilizado junto a um endoscópio e a um smartphone, unicamente para auxiliar na captura, filmagem e no compartilhamento de imagens para videoendoscopia em geral.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO

O Oto Scope é um adaptador que permite que as imagens capturadas por endoscópios sejam transferidas diretamente para telefones celulares do tipo smartphone ao invés de torres de gravação, tornando o processo de obtenção, armazenamento e transmissão de imagens obtidas pelos endoscópios rígidos mais fácil, rápido e conveniente.

MATERIAIS DE FABRICAÇÃO

Plástico ABS, EVA e inox série 300

MODO DE USO DO PRODUTO

O Oto Scope conecta o smartphone a um endoscópio rígido padrão criando uma alternativa altamente portátil e de baixo custo em relação à torre de vídeo tradicional. Com o adaptador, profissionais médicos têm acesso fácil a vídeos de endoscopia com qualidade hd, que são simples de obter, armazenar e compartilhar.

ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em local seco, arejado e ao abrigo da luz.

TRANSPORTE

As caixas contendo os adaptadores devem ser transportadas sem exposição direta ao calor, luz e umidade.

MANUSEIO DO PRODUTO

Os adaptadores que estiverem visivelmente empoeirados devem ser limpos para a remoção de detritos antes da limpeza;

A limpeza deve ser feita com lenços umedecidos com álcool isopropílico;

A limpeza adequada envolve o contato com o agente desinfetante e fricção durante a limpeza. Cada telefone, devem ser limpos.

Não usar solventes ou detergentes abrasivos;

O Oto Scope não deve ser esterilizado, portanto não pode ser autoclavado, ou qualquer outro método de esterilização.

ESTERILIZAÇÃO

Produto **não** estéril.

ADVERTÊNCIAS

Antes de utilizar o produto leia com atenção as instruções de uso;

Produto de uso médico - Somente profissionais habilitados devem fazer uso do mesmo;

Produto frágil;

Não estéril - Não devem ser submetidos a esterilização de qualquer tipo;

Deve-se antes de cada uso realizar a limpeza dos adaptadores com lenço e solução desinfetante;

O reprocessamento consiste na limpeza externa e inspeção do equipamento.

PRECAUÇÕES

Não use força excessiva durante manipulação do OTO-SCOPE.

EFEITOS ADVERSOS

Não aplicável

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

ENGEORTHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

CNPJ: 36.006.124/0001-21

RUA FRANCISCO AMÉRICO, 270 – JARDIM MARISSOL

CEP: 83030-499 LONDRINA/PR

TELEFONE: (43) 3334-0372